

Masque Réutilisable

◆◆◆◆ Certifié Oeko-Tex 100 : Composants exempts de substances nocives pour la santé

100 % Polyester  

Masque de protection grand public antiprojections.

◆ Tissu lavable et réutilisable

Excellente respirabilité / Confort optimal.

Confectionné en triple couches.

Masque alternatif pour protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant des masques.

Avec les caractéristiques suivantes : filtration supérieure à 90% pour la filtration de particule de $3\mu\text{m}$ émises.

Tissus fabriqués en France. (Norme de Blanc TRB)

Confection à Annonay (France)

Certification Oeko-Tex 100

À laver avant la première utilisation.

Lavable en machine de 60°C.

Résiste à au moins 20 lavages.

Conseils d'utilisation

- ◆ Un lavage préalable est préconisé avant utilisation.
- ◆ Avant de mettre le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.
- ◆ Placer les élastiques de part et d'autre des oreilles.
- ◆ Placer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veiller à l'ajuster au mieux sur votre visage.
- ◆ Lorsque l'on porte un masque, il faut éviter de le toucher et ne pas le déplacer.
- ◆ Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.
- ◆ Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque.
- ◆ Pour retirer le masque, enlever celui-ci par les élastiques (ne pas toucher le devant du masque).
- ◆ L'isoler dans un sac plastique à jeter, ou dans un sac réutilisable pour le laver. Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.

IMPORTANT : le port du masque est limité à 4 heures, après ce délai, changer à nouveau de masque.

images
& couleurs

Impression sur tissu

04 75 34 18 34

14 Avenue Daniel Mercier
07100 Annonay

